

Link do produktu: <https://reha24.pl/dansac-nova-2-worek-1201-70-p-5410.html>



DANSAC Nova 2 worek 1201-70

Cena	5,45 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23535

Opis produktu

Worek stomijny 2-częściowy z systemem otwartym

Produkty z linii **Dansac Nova** zaprojektowane zostały tak, aby kompleksowo zabezpieczyć wszelkie potrzeby osób z wylonioną stomią. Poniżej przedstawiamy listę cech wspólnych dla wszystkich produktów występujących w linii **NOVA**.

Podwójna ochrona filtra

Filtr węglowy jest został zabezpieczony przed wilgocią kilkoma warstwami folii, dzięki czemu do filtra docierają wyłącznie gazy, a treść jelitowa pozostaje w worku i nie blokuje filtra. Dodatkowo filtr chroniony jest przed wilgocią przez teflonową membranę, dzięki której można brać prysznic bez obaw, że woda zakłóci prawidłową pracę filtra. Filtr prawidłowo działa również w nocy niezależnie od pozycji przyjmowanej w czasie snu.

Higiena

Dla właściwej ochrony skóry wokół stomii, a także aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów przy każdej zmianie worka należy oczyścić płytkę. Dzięki rozwiązaniu zastosowanemu w systemie dwuczęściowym Dansac Nova 2 jest to niezwykle proste, aby umyć płytkę wystarczy ciepła woda i miękka ściereczka, którą należy wyczyścić płytkę. Codzienna higiena po prostu nie może być łatwiejsza

Redukcja nieprzyjemnych odgłosów

Woreczki Dansac Nova zbudowane są ze specjalnie tłoczonej folii z pęcherzykami powietrza, dzięki której treść jelitowa nie przylega do ścianek worka. Eliminuje ona również odgłosy towarzyszące opróżnianiu się jelita. Delikatne i miękkie woreczki Dansac Nova zwiększają komfort i dyskrecję

Bezpieczne połączenie

Dansac Nova 2 posiada unikalny dwukolorowy i niezwykle bezpieczny system łączenia płytki z workiem. Wbudowany w płytkę beżowy pierścień i przezroczysty pierścień w worku zamykają się w sposób łatwy i bezpieczny, a słyszalne przy zatraskiwaniu "kliknięcie" daje pewność właściwego połączenia woreczka z płytką, co można również zobaczyć dzięki przezroczystemu

- niezwykła elastyczność płytki i pierścieni zatraskowych umożliwia ułożenie płytki i woreczka do kształtu ciała,
- specjalne uchwyty pozwalają na łatwe przypięcie paska mocującego,
- beżowy pierścień w płytce i przezroczysty w woreczku zamykają się w sposób łatwy i bezpieczny,
- charakterystyczne "kliknięcie" oznacza właściwe połączenie woreczka z płytką

- **Pomarańczowa wypustka**

Łatwo zauważalna pomarańczowa wypustka z nieklejącym się języczkiem powoduje, że z płytki można szybko i bezpiecznie odkleić folię zabezpieczającą.

Po użyciu, płytkę prosto usunąć z ciała pociągając za pomarańczowy języczek

- **Otwór w płytce przesunięty do góry**

Otwór znajduje się w górnej części płytki, dzięki czemu worek po przyklejeniu układa się niżej na brzuchu, jest łatwiejszy do ukrycia i jednocześnie zyskuje na pojemności

- **Wodoodporna fizelina**

Płytką w systemie Dansac NovaLife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

- **Owalny kształt płytki**

Owalny kształt powoduje, że płytka dopasowuje się do naturalnych zaokrąglenia ciała, łatwo jest ją dociąć i przykleić tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. W workach jednoczęściowych istnieje możliwość wycięcia owalnego otworu.

- **Niezwykłe wydajny filtr NovaLife**

Dzięki dwóm membranom, które chronią filtr przed zapchaniem zarówno od wewnątrz przed zawartością worka, jak i od zewnątrz przed wodą i innymi substancjami filtr osiąga wysoką wydajność. Ponadto dzięki dużej powierzchni znacznie wzrasta ilość filtrowanych gazów, co minimalizuje ryzyko tworzenia się balonu.

- **Płytką przymocowana do górnej krawędzi worka**

Płytką w systemie Dansac NovaLife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

- **Bezpieczne przyleganie**

Wokół stomii płytka jest najgrubsza natomiast przy brzegu jest już bardzo cienka. Taka budowa gwarantuje bezpieczne klejenie się płytki i właściwe zaopatrzenie stomii.

- **Płytką przyjazna dla skóry**

Przyjazna dla skóry hydrokoloidowa płytką na bazie naturalnych składników jest przyjazna dla skóry, nie uczula i pozwala utrzymać skórę w dobrej kondycji.

- **Bezpieczne i elastyczne zapięcie**

W systemie dwuczęściowym płytka i worek łączą się za pomocą sprawdzonego bezpiecznego dwukolorowego zapięcia. Elastyczny pierścień ułatwia dopasowanie się płytki do kształtu ciała.

- **Łatwe otwieranie, proste czyszczenie**

Elastyczny pasek usztywniający wyjście worka umożliwia łatwe i higieniczne otwieranie i opróżnianie worka. Wystarczy lekko nacisnąć ujęcie z obu stron. Składane na 4 części zamknięcie, zapewnia szczelność worka.

Wygodne zamknięcie ułatwia również oczyszczenie końcówki worka na zewnątrz jak i wewnątrz.

- **Dyskretne zamknięcie**

Zamknięcie jest dyskretne i zlewa się z kształtem worka, dzięki czemu **noszenie worka jest jeszcze bardziej komfortowe i łatwiej go ukryć pod ubraniem.**

Występujące modele:

Wysokość x szerokość (mm)

194 x 150

Pojemność (ml)

470

Średnica pierścienia (mm)
kolor- nr katalogow

q

36
beżowy- 1201-36
przezroczysty- 1202-36

q

43
beżowy- 1201-43
przezroczysty- 1202-43

□ q

55

beżowy- 1201-55
przezroczysty- 1202-55

□q

70

beżowy- 1201-70
przezroczysty- 1202-70